


Blutentnahme und Probenversand: Schritt für Schritt

1. Dokumente

Bitte geben Sie Ihre schriftliche Einwilligung und füllen Sie den Fragebogen aus.

2. Blutentnahme

- **200 µl Vollblut** benötigen wir zur erfolgreichen Durchführung des Typ-1-Diabetes-Früherkennungstests. Grundsätzlich kann das Blut wahlweise kapillar oder venös entnommen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Hände des Kindes gut erwärmt sind. Knetspiele, warmes Wasser oder Gymnastik können hier hilfreich sein.
- Desinfizieren Sie den Finger des Kindes.
- Drücken Sie den Finger leicht zusammen, setzen Sie die Lanzette nach Entfernen der Schutzkappe fest auf die Fingerbeere und drücken Sie den Auslöser.
- Halten Sie den Finger so, dass der Blutstropfen nach unten „hängt“ und nehmen Sie das Blut mit der Kapillare auf.
- Durch leichtes Klopfen fließt das Blut aus der Kapillare gut in die Microvette© ab. Nur Blut, das wirklich im Röhrchen ist, kann auch verarbeitet werden.
- Achtung: Vermeiden Sie zu häufiges Wischen, da dies die Blutgerinnung anregen kann!
- Sollte die Kapillare verstopft sein, kann man den Deckel mit der Kapillare entfernen und das Blut über den Rand in die Microvette© tropfen lassen.
- Verschließen Sie nach beendeter Blutentnahme das Röhrchen mit dem Deckel, der sich am Gefäßboden befindet. Dieser muss mit einem hörbaren „Klick“ einrasten.
- Bitte versehen Sie die Microvette© nach der Blutentnahme mit einem Barcodeaufkleber vom Fragebogen. Beachten Sie, dass der Barcode längs aufgeklebt wird.

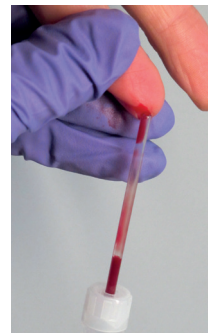

3. U-Heft

Den Fr1da^{plus}-Aufkleber vom Fragebogen können Sie in das U-Heft des Kindes einkleben.




Fr1da^{plus}-Studie in Bayern

Typ-1-Diabetes: Früh erkennen – Früh gut behandeln



4. Versand

- Legen Sie die geschlossene Microvette© in die vorgesehene Sauglystasche.
- Legen Sie anschließend die Sauglystasche in den flüssigkeitsdichten Beutel und verschließen Sie diesen mit dem Klebestreifen.
- Der Beutel mit der Probe kann nun zusammen mit den Dokumenten (siehe 1.) in einer (wattierten) Versandtasche verpackt und losgeschickt werden.
- Versenden Sie die Probe nur von **Montag bis Donnerstag!**

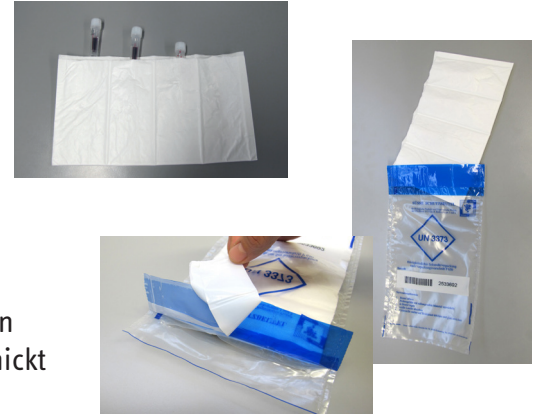

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Fr1da^{plus}-Team